

beper



Heizkissen mit Kirschkernen und Lavendelessenz

C302AAC003

Wärmekissen mit Kirschkernen und Lavendelaroma als natürliches Heilmittel gegen Krämpfe und

Beper S.r.l.
Via Antonio Salieri, 30 37050 Vallese di Oppeano (VR)
www.beper.com



Muskelverspannungen.

Das mit Baumwolle bezogene und in vier Abschnitte unterteilte Kissen sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und wärmt den Körper gleichmäßig. Nach dem Erhitzen in der Mikrowelle oder im Backofen gibt der Kirschkernel Wärme ab und lindert Schmerzen und Muskelverspannungen. Die Anwendung ist schnell und einfach, dank abnehmbarem Baumwollbezug zum Waschen. Die wohltuende Lavendelessenz wird beim Erhitzen des Kissens freigesetzt.

Heißanwendung: Erwärmen Sie das Kissen im Backofen (max. 70 °C für ca. 5 Minuten) oder in der Mikrowelle (800 W für ca. 30 Sekunden). Passen Sie die Heizzeiten je nach Backofentyp an. Erwärmen Sie das Kissen erneut auf die gewünschte Temperatur und legen Sie es auf die Körperoberfläche.

Kaltanwendung: Legen Sie das Kissen für ca. 30–45 Minuten in den Kühl- oder Gefrierschrank. Nehmen Sie es anschließend heraus und legen Sie es auf die gewünschte Körperstelle.

Beper S.r.l.

Via Antonio Salieri, 30 37050 Vallesse di Oppeano (VR)

www.beper.com

beper



CALDO & FREDDO
HOT & COLD



FORNO & MICROONDE
OVEN & MICROWAVE



FRIGO
FRIDGE



LAVABILE
WASHABLE

Essenza di LAVANDA
LAVENDER essence



Heizkissen mit Kirschkernen und Lavendelessenz

C302AAC003


PRODUKTABMESSUNGEN: 50X18X2 CM

NETTOGEWICHT: 1 KG KG

VERPACKUNGMAßE: 24X7X18 CM

VERPACKUNGSEINHEIT: GIFT BOX

STUCKE PRO PAKET: 6

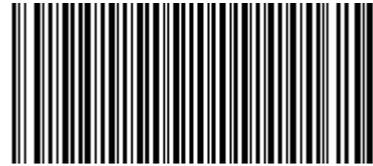

8056420226331

Beper S.r.l.

Via Antonio Salieri, 30 37050 Vallese di Oppeano (VR)

www.beper.com